

## WIP'ANIOS EXCEL

**REF.: KIN4827-** Toallitas detergentes desinfectantes para superficies

- Toallitas detergentes y desinfectantes para el tratamiento de las superficies, dispositivos médicos no sumergibles y no invasivos y limpieza de las vainas de los endoscopios durante el tratamiento preliminar antes de la inmersión para limpieza y desinfección. Ejemplo: sondas ecográficas clásicas, sensores de presión, medidores de glucosa, tensiómetros, martillos de reflejos, etc
- Toallitas de viscosa 100% biodegradables.
- Solución de impregnación: 5ml de SURFA´SAFE PREMIUM por toallita, formulada sin perfume ni alcohol
- Eficacias: Bactericida, Levaduricida, Fungicida, Activo frente Norovirus, Adenovirus, VHC, VHB, VIH, Poliomavirus SV 40, Rotavirus, Vaccinia virus.
- Composición: impregnadas de una solución detergente y desinfectante de Cloruro de didecildimetilamonio (NºCAS 7173-51-5: 3mg/g), tensioactivos no iónicos, agentes secuestrantes, excipientes.
- Toallitas de un solo uso.
- Eficacia antimicrobiana a partir de 2 minutos.
- Tamaño de la toallita: 180 x 200mm
- Presentación: envase de 100 toallitas.
- Producto sanitario Clase IIb. (Directiva 93/42/CEE modificada).
- Almacenamiento: entre +5 °C y +35 °C.
- Propiedades microbiológicas: Las toallitas WIP'ANIOS Excel son bactericidas y levuricidas según la EN 16615. La solución de impregnación es:

Activo contra	Normas	Tiempo de contacto
Bacterias	EN 13727	1 minuto
	EN 16615	2 minutos
	EN 13727 frente ERV, A. baumannii βLSE, E. coli OXA 48, E. cloacae OXA 48, K. pneumoniae OXA 48, SARM	1 minuto
	EN 13697 frente ERV, A. baumannii βLSE, E. coli OXA 48, SARM	2 minutos
Levaduras	EN 13624	2 minutos
	EN 16615	2 minutos
Mohos	EN 1275, EN 13624, EN 13697	20 minutos
Virus	EN 14476 : Adenovirus, MNV	30 minutos
	PRV (virus modelo de HBV), BVDV (virus modelo de HCV), Vacciniavirus, HSV, Rotavirus	1 minuto
	Polyomavirus SV 40	5 minutos

