
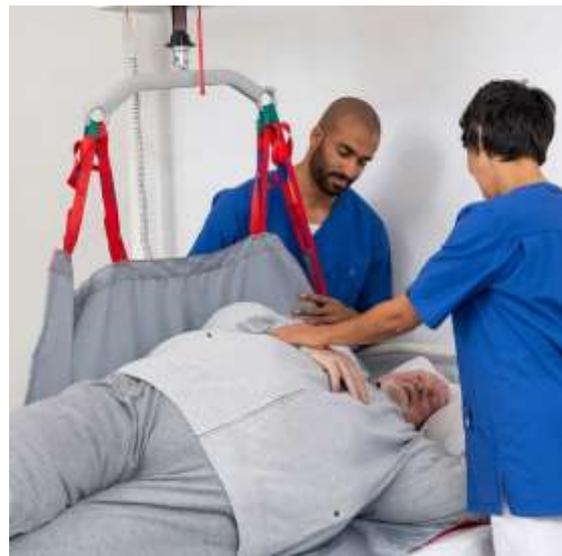


CINCHA PARA REPOSICIONAMIENTO Y TRANSFERENCIA MOLIFT RGOSLING

REF.: 1721570- Cincha para reposicionamiento y transferencia Molift RgoSling

- El arnés/sábana de posicionamiento y transferencia, está pensado para los traslados a cama o entre cama/camilla.
- El arnés/sábana de reposicionamiento está diseñada para funcionar con un sistema de elevación en suspensión y se utiliza para levantar o posicionar, traslado lateral o cuando sea necesario un cambio de cama.
- Está pensado para funcionar como un sistema en la cama para la máxima comodidad del paciente. Dado que la sábana siempre está colocada en la cama, una multitud de situaciones de cuidados se hacen más rápidas y fáciles tanto para el cuidador como para el paciente.
- Se utiliza para posicionar o transferir a la cama/ camilla o para la camilla de diagnóstico/ obtención de imágenes médicas (radiotransparente). También para trasladar de lado a lado, centrar en la cama, girar al paciente hacia los lados o hacer rodar hacia los lados de la cama y girar al paciente para aliviar la presión.
- El arnés tiene cuatro correas a cada lado. Las correas tienen distintas longitudes posibles para adaptar a las necesidades del paciente cuando se traslada o se posiciona en diferentes situaciones.
- Gracias a la clara codificación de colores de las correas, los cuidadores pueden ver y comunicarse fácilmente qué posición/color debe tener la correa adjunta a cada lado de la percha.
- Está fabricada en 100% poliéster duradero.
- Carga de trabajo máxima segura: 500Kg.
- Medidas: 1340 x 1300mm
- Instrucciones de lavado:
 - Lavar a máquina máx. temperatura 85°C (el lavado a temperaturas más bajas aumenta la vida útil del producto)
 - Secado en secadora a baja temperatura; máx. temperatura 60°C.
 - No planchar.
 - No limpieza en seco.
 - No usar blanqueador.
- Producto de clase I de acuerdo con el MDD 93/42 CEE, Marca CE.
- ISO10535 grúas para traslado de personas con discapacidad.
- Requisitos y métodos de ensayo, ISO 14971 equipos médicos – análisis de riesgos.
- Cumple con todas las normativas de la CE.

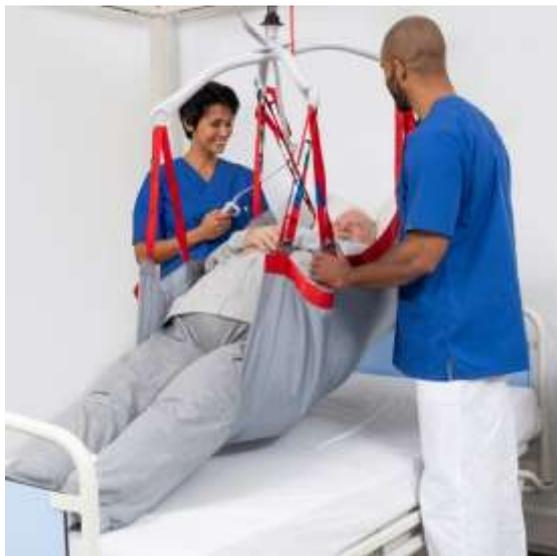

Correas de colores:

